

Was ist vor der Aufstellung zu beachten?

Damit das Gerät termingerecht und ordnungsgemäß aufgestellt werden kann, sollten die bauseitigen Voraussetzungen anhand dieser Kontrollliste kontrolliert und gewährleistet werden. Ziehen Sie bei Bedarf eine fachkundige Person zu Rate.

Praxis/Klinik (Name, Anschrift)

Fachhändler/MELAG-Kundendienst (Name, Anschrift)

- Bitte kreuzen Sie die folgenden Punkte nach Kontrolle an. Senden Sie diese Liste an MELAG (Fax +49 (0)30 757 911 1083).

Platzbedarf/Räumlichkeiten

- Die lichte Breite von Türen etc. vom Praxiszugang bis zum Aufstellort muss mindestens 60 cm betragen.
- Die folgende Aufstellfläche ist vorhanden:


Platzbedarf	Maße	
Breite x Tiefe	60 cm x 60 cm	
Höhe	min. 82 cm	
Höhe mit Edelstahldeckplatte	84 cm	
Höhe mit Unterschrank	124 cm	
Mindestabstand zur gegenüberliegenden Arbeitszeile	70 cm	
Zusätzlicher Platzbedarf für eine Mischbettharzpatrone	MELAdem 53	MELAdem 53 C
Durchmesser x Höhe	Ø 24 cm x 57 cm (ca. 61,5 cm inkl. Anschlussbogen)	Ø 24 cm x 45 cm (ca. 49 cm inkl. Anschlussbogen)

Hinweis: Wird das Gerät direkt in der Ecke einer L-förmigen Arbeitszeile eingebaut, können vorhandene Schubladen links oder rechts vom Gerät **nicht** geöffnet werden.

- Die Aufstellfläche hält einer Bodenbelastung von 113 kg für ein Unterbaugerät, 119 kg für ein freistehendes Gerät und 182 kg für ein Schrankgerät stand.

Hinweis: Wird das Gerät mit Unterschrank aufgestellt, so muss dieser mithilfe der Wandfixierung (Art.-Nr. 21589) zusätzlich an der Wand gesichert werden.

Elektroanschluss


 Arbeiten an der Elektroanlage dürfen nur von einer zugelassenen und anerkannten Fachkraft durchgeführt werden!

- Ein fachgerechter Elektroanschluss wird vom Praxisbetreiber zur Verfügung gestellt. Der Anschluss soll mit Leitungsquerschnitten von 2,5 mm² ausgeführt werden.

MELAtherm 10 DTA/MELAtherm 10 Evolution DTA	MELAtherm 10 DTB/MELAtherm 10 Evolution DTB
<input type="checkbox"/> CEE Steckdose mit 380-415 V, 50 Hz oder 60 Hz*), 16 A-Absicherung Typ B <input type="checkbox"/> Eine allpolige Trennung ist gewährleistet <input type="checkbox"/> Zusätzlicher FI-Schalter mit einem Auslösestrom von 30 mA ist vorhanden	<input type="checkbox"/> 220-240 V, 50 Hz oder 60 Hz*) Steckdose, 16 A-Absicherung Typ B <input type="checkbox"/> Zusätzlicher FI-Schalter mit einem Auslösestrom von 30 mA ist vorhanden Hinweis: Wenn das Gerät für einen dauerhaften Betrieb mit einer Umgebungstemperatur von über 35 °C bestimmt ist, dann ist der technische Service für weitere Informationen zu kontaktieren.

*) Die Gerätevariante 60 Hz gilt für MELAtherm 10 DTA/DTB und gilt nicht für MELAtherm 10 Evolution DTA/DTB.

Wasseranschluss

- Das Reinigungsergebnis und die Werterhaltung des Instrumentariums hängen stark von der Qualität des Leitungswassers ab. Es wird daher die Verwendung eines Vorfilters empfohlen.
- Der Wasserablauf wurde fachgemäß – unter Beachtung der Hinweise im Technischen Handbuch – installiert. Der Wasserablauf ist ohne Behinderung möglich (**Achtung bei hausseitigen Hebeanlagen!**).
-  Das Abwasser kann kurzzeitig bis zu 95 °C heiß werden!
- Die Abpumprate beträgt 40 l/min, die Abwassermenge bis zu 30 l/h (in kleineren Intervallen).
- Die maximal zulässige Wasserhärte beträgt 40 °dH. Bei höheren Härten muss eine Wasserenthärtungsanlage vorgeschaltet werden. Bei einer zentralen Vollentsalzungsanlage beträgt die max. zulässige Leitfähigkeit 5 µS.
- Anschlüsse (3/4" Außengewinde) an das Trinkwassernetz sind vorhanden und für den Anschluss des Gerätes zugänglich.
- Der empfohlene Fließdruck beträgt für den Kaltwasseranschluss (KW) und den vollentsalzten Wasseranschluss (VE) 250 kPa (2,5 bar) - 1000 kPa (10 bar), in den Niederlanden 300 kPa (3 bar) - 1000 kPa (10 bar).
- Es wird ein Leckwassermelder, z. B. der Wasserstopp von MELAG (Art.-Nr. 01056), empfohlen.

Prozessmedien

- Der Praxisbetreiber stellt die zur Inbetriebnahme erforderlichen Prozessmedien gemäß MELAG-Empfehlung bereit (je ein 5 l Kanister Reiniger und Neutralisator und mindestens ein 1 l Kanister Klarspüler).

Bemerkung

Oben stehende Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, die Voraussetzungen zur Aufstellung und zur Inbetriebnahme des Gerätes sind gewährleistet.

.....
Unterschrift des Fachhändlers/MELAG-Kundendienstes

.....
Unterschrift/Stempel der Praxis/Klinik