

Triage[®]

Automatisiert.
Kalibriert.
Verbunden.

Professionelle Diagnostik am Point-of-Care



Das Quidel Triage System



Schnelle quantitative Ergebnisse in nur 15–20 Minuten*

Das Quidel Triage MeterPro wird in tausenden von Gesundheitseinrichtungen weltweit eingesetzt. Ein umfassendes Testmenü bietet die diagnostischen Antworten, die Sie benötigen, um schnelle und kosteneffiziente Behandlungsentscheidungen direkt am Behandlungsort fällen zu können.

*mit Ausnahme des Triage TOX Drug Screen, 94600



Laborqualität mit der Geschwindigkeit von Point-of-Care Tests

- Ergebnisse in 15-20 Minuten.
- Integrierte Qualitätskontrollen im Messgerät, in der Software und in den Testgeräten eingebaut.
- Chargen-spezifische Assay-Kalibration (via Chargen-spezifischem CODE CHIP™-Modul).
- Externes Qualitätskontrollmaterial verfügbar für Qualitätssicherung.
- Operatoren-ID und QK-Lockouts.
- Batch-Testung für mehrere Patienten möglich, sofern das Testgerät innerhalb von 30 Minuten nach Probenzugabe verarbeitet wird.
- EDTA-Vollblut oder EDTA-Plasmaproben (kardiovaskuläre Tests) bzw. Urinproben (Triage TOX Drug Screen).

Einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand

- Erfordert weder spezielle Expertise noch umfängliche Schulung.
- Barcode-Leser für Patienten- und Operatoren-ID.
- Keine Wartung außer Papier- und Batterieersatz sowie periodische Außenreinigung.
- Quantitative diagnostische Panelergebnisse werden in einfach zu lesenden Zahlen angezeigt, gedruckt und zusätzlich hervorgehoben*, wenn das Ergebnis über dem erwarteten Wert liegt.
- Qualitative diagnostische Panelergebnisse werden als positiv (POS) oder negativ (NEG) angezeigt und gedruckt: keine Interpretation von Linien notwendig.

Anbindbarkeit, z.B. über das Quidel Triage Census® Advanced Test Management (ATM)-System

- Umfassende Lösung für Überwachung und Management des Quidel Triage Systems: liefert Berichte zu Messdaten, Messgerät und Operatorenkontrolle sowie Qualitätskontrollanalysen.
- Flexibles Interfacemodul, das zur Kommunikation mit Systemen von Drittanbietern verwendet werden kann.

* mit Ausnahme des D-Dimer



Das Quidel Triage System kann die Entscheidungsfindung für kritische Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, akutes Koronarsyndrom, Herzinfarkt und thromboembolische Ereignisse beschleunigen.

Messbereich						
Testgerät/Panel	Myoglobin	CK-MB	Troponin I	BNP	D-dimer	NT-proBNP
Quidel Triage Cardiac Panel	5-500 ng/ml	1,0-80 ng/ml	0,05-30 ng/ml			
Quidel Triage Profiler SOB™ Panel	5-500 ng/ml	1,0-80 ng/ml	0,05-30 ng/ml	5-5.000 pg/ml	100-5.000 ng/ml	
Quidel TriageTrue® High Sensitivity Troponin I Test			0,1-1.000 ng/l			
Quidel Triage Troponin I Test			0,01-10 ng/ml			
Quidel Triage Cardio3 Panel		1,0-80 ng/ml	0,01-10 ng/ml	5-5.000 pg/ml		
Quidel Triage BNP Test				5-5.000 pg/ml		
Quidel Triage NT-proBNP Test						20-35.000 pg/ml
Quidel Triage D-Dimer Test					100-5.000 ng/ml	



Quidel Triage TOX Drug Screen 94600



Ein Screening-Test, der den simultanen qualitativen Nachweis von Drogen/Medikamenten und/oder den wichtigsten Metaboliten über einer Schwellenkonzentration von bis zu 8 unterschiedlichen Substanzklassen (9 einzigartige Assays) in Urin ermöglicht.

Schwellenkonzentrationen für Drogen-/Medikamenten-Assays

Amphetamine	AMP	500 ng/ml
Metamphetamine	mAMP	500 ng/ml
Barbiturate	BAR	200 ng/ml
Benzodiazepine	BZO	200 ng/ml
Kokain	COC	150 ng/ml
Methadon-Metabolit	EDDP	100 ng/ml
Opiate	OPI	300 ng/ml
Cannabinoide	THC	50 ng/ml
Trizyklische Antidepressiva	TCA	1000 ng/ml

Einfache Testdurchführung

- 1 Patientenprobe mit beiliegender Pipette auf Panel auftragen.



- 2 Das Testgerät in das Quidel Triage MeterPro einsetzen.



- 3 Ergebnis vom Display ablesen und vom Messgerät ausdrucken.



Das Quidel Triage System ist dafür konzipiert, rasch und einfach Ergebnisse zu liefern.



- Flexibilität mit anpassbaren Testpanels via Test Select™-Funktion (Option zur Auswahl von Tests nach Bedarf).
- Automatisierte, objektive Auswertung der Testergebnisse, welche die Entscheidungsfindung beschleunigt.
- Reduziert die Zeit bis zum Ergebnis und kann dadurch zu einer rascheren Patientenversorgung, reduzierter Aufenthaltsdauer und erhöhtem Patientendurchsatz in der Notaufnahme führen.

Produktkatalog: Quidel Triage System

Produkt	Menge	Kat.-Nr.
Tests und Kontrollen		
Quidel Triage Cardiac Panel*	25 Tests	97000HSEU
Quidel Triage Profiler SOB™ Panel*	25 Tests	97300EU
Quidel Triage BNP Test	25 Tests	98000XREU
Quidel Triage BNP Control 1	15 Ampullen (5x0,25 ml)	98013XR
Quidel Triage BNP Control 2	25 Ampullen (5x0,25 ml)	98014XR
Quidel Triage BNP Calibration Verification	10 Ampullen (10x0,25 ml)	98015XR
Quidel Triage D-Dimer Test*	25 Tests	98100EU
Quidel Triage Total 5 Control 1	5 Ampullen (5x0,25 ml)	88753
Quidel Triage Total 5 Control 2	5 Ampullen (5x0,25 ml)	88754
Quidel Triage Total 5 Calibration Verification	10 Ampullen (10x0,25 ml)	88755
Quidel TriageTrue® High Sensitivity Troponin I Test*	25 Tests	97600EU
Quidel TriageTrue High Sensitivity Troponin I Control 1*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	97613EU
Quidel TriageTrue High Sensitivity Troponin I Control 2*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	97614EU
Quidel Triage Troponin I Test*	25 Tests	98600EU
Quidel Triage Cardio3 Panel*	25 Tests	97400EU
Quidel Triage Total 3 Control 1*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	88733
Quidel Triage Total 3 Control 2*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	88734
Quidel Triage NT-proBNP Test*	25 Tests	98700EU
Quidel Triage NT-proBNP Control 1*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	98713EU
Quidel Triage NT-proBNP Control 2*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	98714EU
Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600	25 Tests	94600
Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600 Control 1	15 Ampullen (5x0,25 ml)	94613
Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600 Control 2	25 Ampullen (5x0,25 ml)	94614
Quidel Triage PLGF Test*	25 Tests	98800EU
Quidel Triage PLGF Control 1*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	98813EU
Quidel Triage PLGF Control 2*	5 Ampullen (5x0,25 ml)	98814EU
Instrumente und Zubehör		
Quidel Triage MeterPro	1 Stück	55071
Quidel Triage MeterPro Barcode Scanner	1 Stück	52142
Quidel Triage MeterPro Y-Adapter	1 Stück	52098
Quidel Triage Druckerpapier	1 Paket	52031
Quidel Triage Supervisor Codechip	1 Stück	80035
Quidel Triage Census Daten-Management Software	Kit	55069

*In den USA nicht erhältlich



Quidel Germany GmbH
Von-Hünefeld-Str. 2
50829 Köln



+49 7154 1593912

+43 316 231239

0800 554864



emeacustomerservice@quidelortho.com